


Pré-désinfection des instruments et préparation de la caisse de transport :

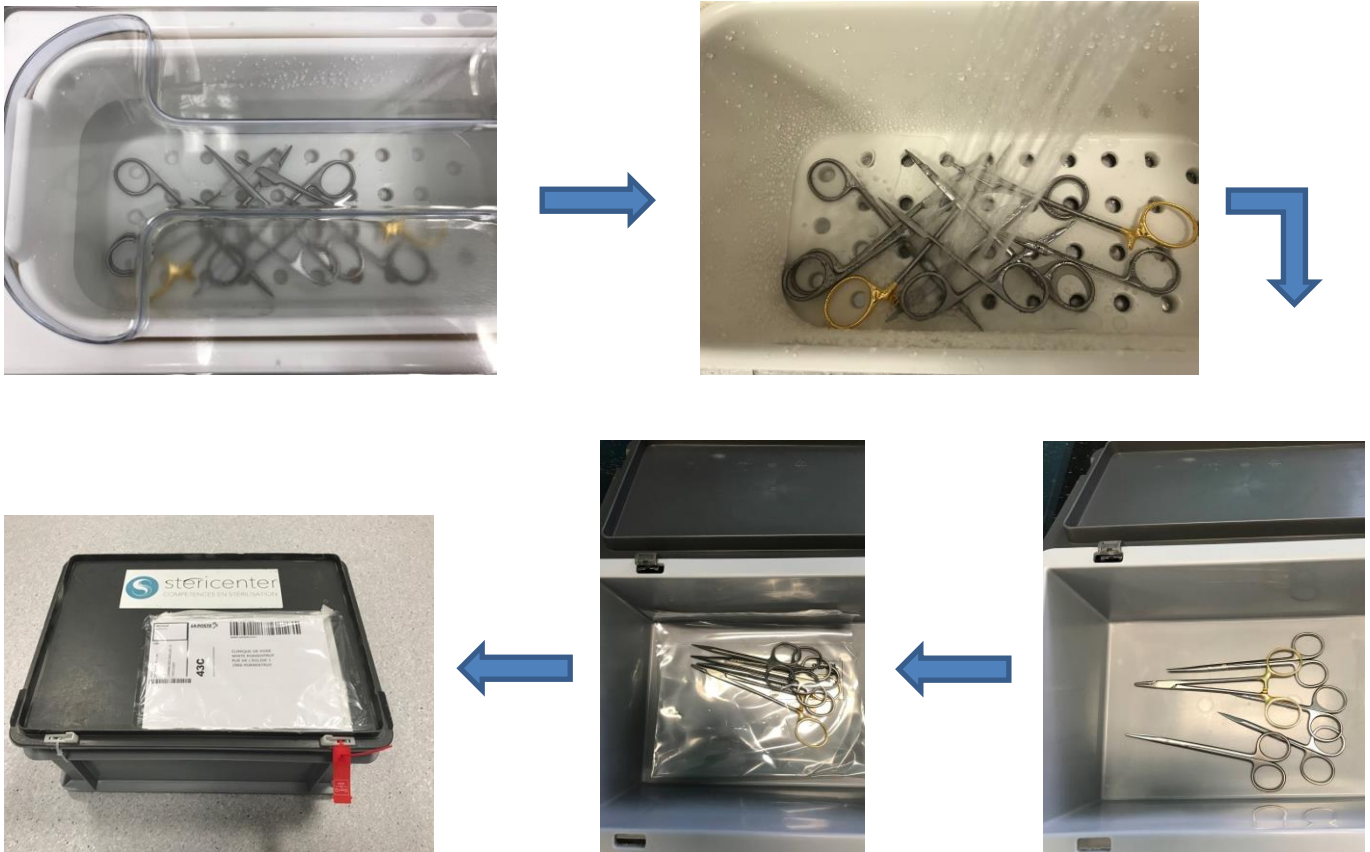

- 1) **Ouvrir** tous les instruments.
- 2) Faire **tremper** les instruments dans votre bac de désinfection selon tableau ci-dessous
- 3) **Rincer** abondamment les instruments
- 4) **Isoler** les instruments piquants et tranchants (dans un bac ou un sachet).
- 5) Placer les instruments dans la caisse de transport, **sceller la caisse** avec le plomb rouge et **compléter la fiche de transport**

Tableau de dosage :

produit utilisé	Neodisher Septo PreClean
concentration	1.0%
durée d'exposition minimum	min. 15 minutes (max 72 heures)
période de renouvellement	7 jours (ou si visuellement sale)
contenance Bac trempage	2 litres
volume d'eau	1.98 litres
volume de désinfectant	20 ml