

Processus	Sous-processus	Instruction	Date de création	Date de modification	Version
Prise en charge	-	N/A	18.08.2021	20.06.2022	V1.1

1. Objet

La pré-désinfection se fait chez le client, elle y est obligatoire pour l'envoi des instruments chez Stericenter. Cette étape doit se faire au plus près et le plus rapidement possible après l'utilisation des dispositifs médicaux. Le produit utilisé pour la pré-désinfection doit être **un détergent et un désinfectant** qui ne doit pas contenir de l'alcool ou de l'aldéhyde afin de ne pas fixer les protéines.

Pour un suivi des formations chez le client, le formulaire [FOR320-06-Formation pré-désinfection](#) est rempli par Stericenter.

2. Définition

La pré-désinfection permet de :

- Diminuer la population de micro-organismes
- Réduire la quantité de souillure
- Éviter l'apparition du biofilm
- Faciliter le nettoyage à venir
- Éviter la contamination de l'environnement par les micro-organismes
- Éviter la détérioration du DM (oxydation)
- Diminuer le risque d'infection lors de la manipulation du DM
- Sécuriser le transport du matériel

3. Explication du tableau ci-dessous

Attention : suivre les instructions du fabricant du détergent-désinfectant que vous utilisez.

Produit utilisé : indique le nom du produit utilisé.

Concentration : la concentration en % du produit lors de son utilisation.

Période de renouvellement : la solution doit être régulièrement changée, selon la notice du fabricant ou s'il y a des souillures visibles dans la solution.

Contenance Bac trempage : totalité obtenue de la quantité d'eau et de la quantité du produit.

Volume d'eau : la quantité d'eau prévue pour le volume du bac.

Volume désinfectant : la quantité de détergent-désinfection pour le volume du bac.


Processus	Sous-processus	Instruction	Date de création	Date de modification	Version
Prise en charge	-	N/A	18.08.2021	20.06.2022	V1.1

4. Déroulement

Etapes de la pré-désinfection :

- 1) **Ouvrir** tous les instruments.
- 2) Faire **tremper** les instruments dans votre bac de pré-désinfection selon tableau ci-dessous.
- 3) **Rincer** abondamment les instruments.
- 4) **Isoler** les instruments piquants et tranchants (dans un bac ou un sachet).

Placer les instruments dans la caisse de transport, **sceller la caisse** avec le plomb rouge et **compléter la fiche de transport**.

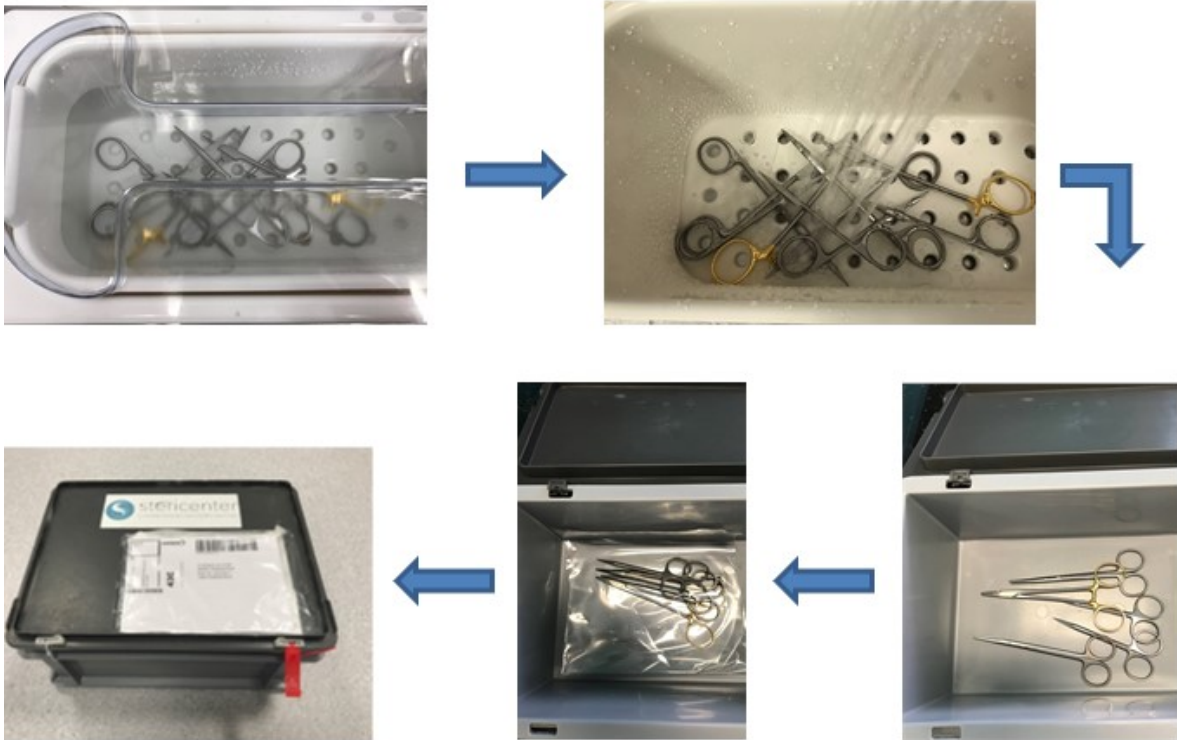

Le tableau de dosage :

produit utilisé	
concentration	
durée d'exposition minimum	
période de renouvellement	
contenance Bac trempage	
volume d'eau	
volume de désinfectant	