

Processus	Sous-processus	Instruction	Date de modification	Version
Gestion du risque	-	N/A	23.08.2021	V2.0

### 1. Objet

Stericenter traite le matériel potentiellement ou contaminé par des ATNC (agent transmissible non conventionnelle) selon les recommandations dans l'OEP de la loi sur les épidémies.

### 2. Tableau (rempli par le client)

<b>Identité du Client</b>	
<b>Numéro du set /instrument</b>	
<b>Identité du patient (#)</b>	(Nous n'avons pas besoin de l'identité complète du patient en question, mais d'un <b>numéro de dossier</b> qui permette de maintenir la traçabilité.)
<b>Type de patient risque</b>	<input type="checkbox"/> CjD suspecté <input type="checkbox"/> CjD avéré <input type="checkbox"/> vCjD suspecté <input type="checkbox"/> vCjD avéré <input type="checkbox"/> Autre : ... ..
<b>Type de procédure</b>	Interventions : <input type="checkbox"/> Neurochirurgicales <input type="checkbox"/> Ophtalmologiques <input type="checkbox"/> Oto-rhino-laryngologiques <input type="checkbox"/> Maxillo-faciales <input type="checkbox"/> Autres : ... ..

### 3. Retraitement

#### Cas 1 : Patient contaminé avéré

Dans ce type de cas les instruments doivent automatiquement être détruits, sans faire de retraitement.

Processus	Sous-processus	Instruction	Date de modification	Version
Gestion du risque	-	N/A	23.08.2021	V2.0

## Cas 2 : Patient suspect

Pour ces patients, nous demandons à nos clients de :

- Se débarrasser des instruments s'il s'agit d'instruments de faible valeur, sans faire de retraitement.

Pour les DMX d'une forte valeur :

- Stericenter est averti par le client.
- **Avertir tous les collaborateurs de la situation**

Au lavage :

La personne au lavage prendra en charge les DMX **séparément des autres instruments.**

1. Prendre des précautions extrêmes dans la manipulation des instruments.
2. A chaque étape, jeter les gants.
3. Préparer un bac de trempage avec le produit **neodisher SeptoClean.**

Dosage :

10ml/L (1% V/V)

Pendant 60 minutes

Eau osmosée

A 23°C

4. Rincer abondamment les instruments à l'eau osmosée.
5. Mettre en laveur-désinfecteur.

Au conditionnement :

Lors du déchargement, le matériel doit être immédiatement pris en charge.

1. Contrôler les instruments (propre, sec et fonctionnel)
2. Placer les DMX dans un conteneur
3. Noter sur le conteneur :
  - CJD suspecté ou avéré
  - Numéro de dossier du patient
4. Coller l'étiquette habituelle
5. Mettre le conteneur à stériliser, celui-ci doit avoir un cycle séparément des autres instruments
6. Mettre en quarantaine le conteneur chez Stericenter ou chez le client.

Les instruments seront mis en circulation lorsque l'on aura la certitude d'absence d'ATNC. Dans le cas contraire, les DMX seront détruits.